

## INDICAÇÃO DE USO:

O princípio da Bainha é manter o acesso ureteral aberto para a realização de procedimentos urológicos endoscópicos a fim de facilitar a passagem de endoscópicos e outros instrumentos nas vias urinárias. Durante trocas repetidas de instrumentos, a bainha faz a proteção do ureter. A bainha também protege instrumentos delicados e endoscópios flexíveis menores contra danos. Tem um revestimento hidrofílico para criar uma superfície de baixo atrito à medida que o ureter é dilatado. O tempo de permanência do produto em contato com o paciente deve ser de acordo com o procedimento cirúrgico que em média dura de 25 a 55 minutos.


## MODO DE USO:

- Antes de utilizar o produto, verifique se a embalagem não está danificada. Caso esteja danificada, o produto não deve ser utilizado.
- Antes de realizar o procedimento e dentro da área adequada para a realização do mesmo, retire o produto de sua proteção, manipulando-o de acordo com as precauções requeridas para produto estéril.
- Assegure-se que a bainha e o dilatador estejam devidamente encaixados com seus conectores. É importante assegurar-se que o dilatador esteja encaixado de forma segura com a bainha durante a inserção para prevenir lesão ureteral da borda exposta da bainha.
- A bainha de acesso ureteral deve ser umedecida para assegurar a lubrificação e introduzida sob o fio guia de trabalho, avançando a bainha com a ponta contrária aos conectores (onde o dilatador apresenta forma cônica) sobre a guia até o interior do ureter usando também fluoroscopia.
- Confirmar por fluoroscopia que tanto o dilatador quanto a bainha estejam corretamente colocados.
- Destavar o conector do dilatador da bainha, retirar o dilatador e o fio guia de segurança e realizar o procedimento endoscópico.
- Quando o procedimento endoscópico estiver concluído o ureter deve ser cuidadosamente inspecionado quanto a uma possível lesão enquanto o ureteroscópio é removido. A bainha deve ser simultaneamente extraída com o ureteroscópio a fim de se visualizar todo o ureter.

## PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

## COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

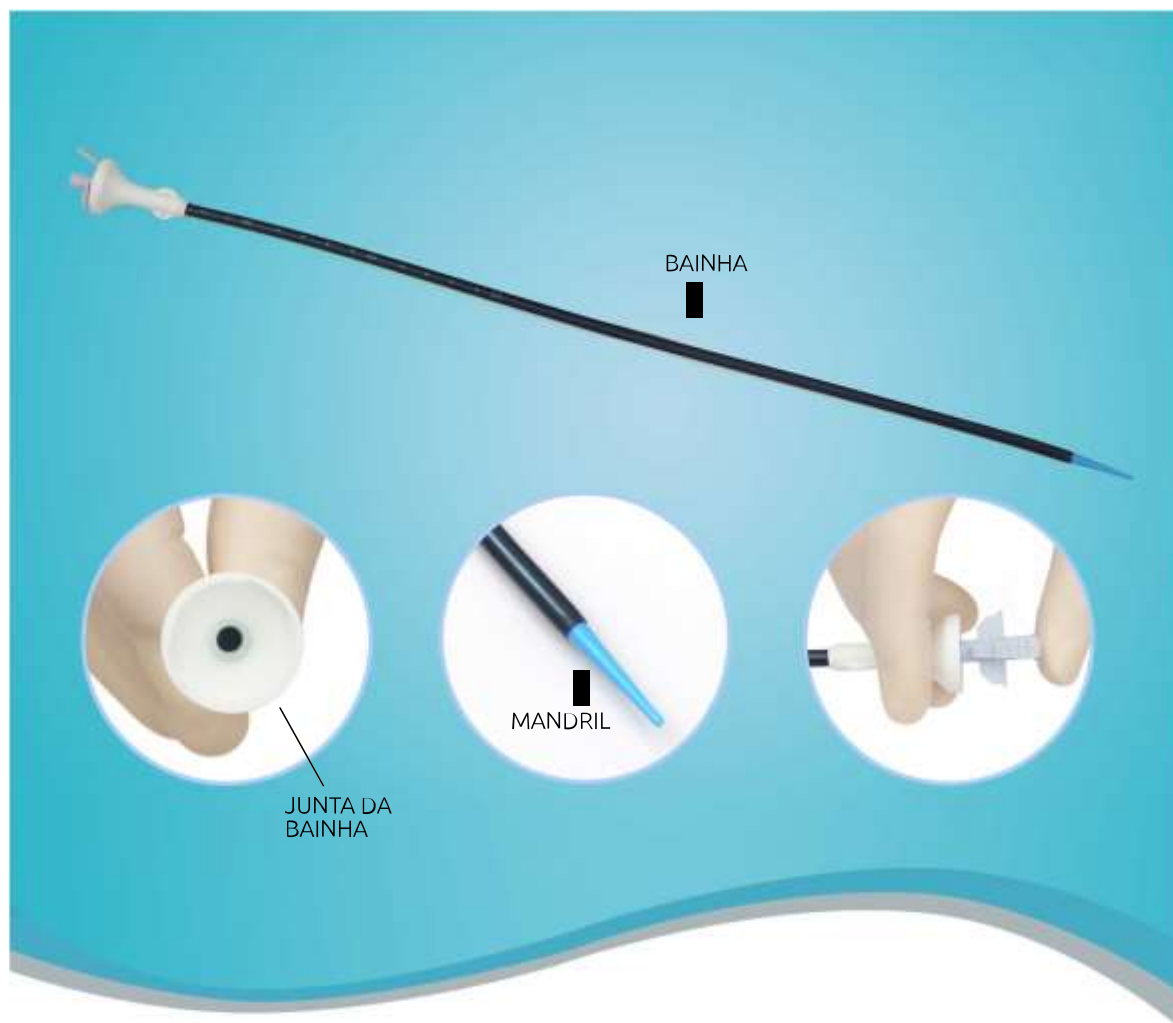

## BAINHA DE ACESSO URETERAL UROLLINE

### COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| BAINHA          | Poliamida (PA)     |
| JUNTA DA BAINHA | Poliuretano        |
| MANDRIL         | Polietileno (PEAD) |

**MODELOS E DIMENSÕES:**

| MODELOS      | DIÂMETRO IN | DIÂMETRO EX | COMPRIMENTO |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CS11/13FR-35 | 11 fr       | 13 fr       | 35 cm       |
| CS11/13FR-45 | 11 fr       | 13 fr       | 45 cm       |
| CS12/14FR-35 | 12 fr       | 14 fr       | 35 cm       |
| CS12/14FR-45 | 12 fr       | 14 fr       | 45 cm       |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

**SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:**

[sac@medhcir.com.br](mailto:sac@medhcir.com.br)

(48) 3380-9166