

INDICAÇÃO DE USO:

O Cateter Ureteral é indicado para a realização do estudo radiológico contrastado do sistema urinário, chamado de pielografia.

NOTA: O tempo máximo de permanência do cateter no paciente é durante o procedimento de pielografia, ou seja, uso transitório.


MODO DE USO:

- Passe o fio guia de tamanho adequado para dentro da pélvis renal com auxílio de um cistoscópio ou equipamento de imagem que permita visualização equivalente;
- Passe o cateter ureteral através do ureter;
- Mantendo a posição do cateter, conecte a seringa e injete os meios de contraste;
- Após a remoção da seringa, conecte o cateter a um saco de drenagem para conter eventual retorno de fluido;
- Retire e descarte o material em lixo hospitalar

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

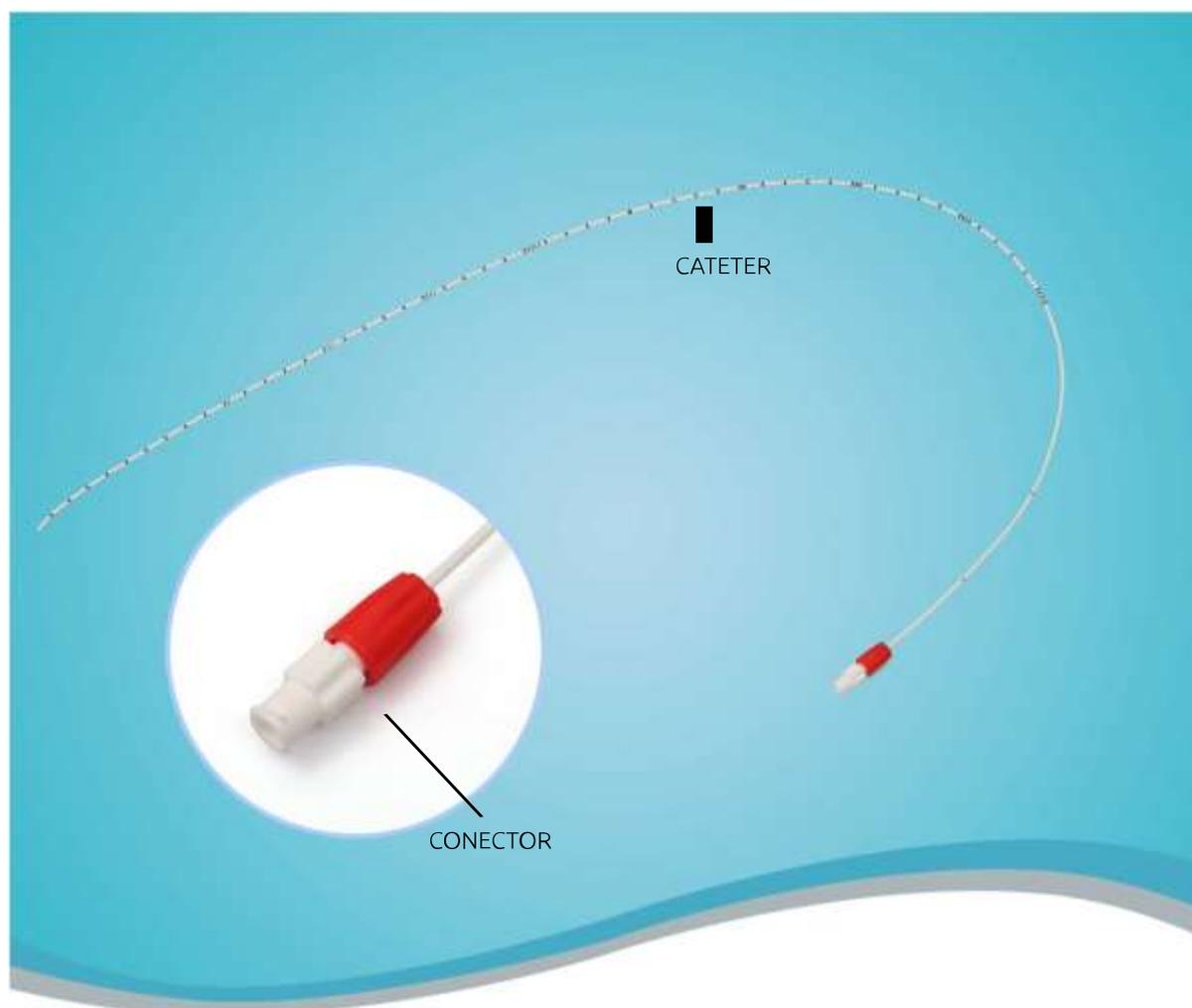

CATETER URETERAL UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

CATETER	Policloreto de Vinila
CONECTOR	Poliamida (PA)

MODELOS E DIMENSÕES:

MODELOS	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	TIPO DE PONTA
UROF3	3FR	70 cm	Fechada
UROF4	4FR	70 cm	Fechada
UROF5	5FR	70 cm	Fechada
UROF6	6FR	70 cm	Fechada
UROF7	7FR	70 cm	Fechada
UROF8	8FR	70 cm	Fechada
UROF9	9FR	70 cm	Fechada
UROF 10	10FR	70 cm	Fechada
UROF 12	12FR	70 cm	Fechada
UROF3A	3FR	70 cm	Aberta
UROF4A	4FR	70 cm	Aberta
UROF5A	5FR	70 cm	Aberta
UROF6A	6FR	70 cm	Aberta
UROF7A	7FR	70 cm	Aberta
UROF8A	8FR	70 cm	Aberta
UROF9A	9FR	70 cm	Aberta
UROF 10A	10FR	70 cm	Aberta
UROF 12A	12FR	70 cm	Aberta

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166