

INDICAÇÃO DE USO:

Os Fios Guia são utilizados para obter acesso e navegar no trato urinário, sua indicação é:

- Para o posicionamento de cateteres e dilatadores na canulação de qualquer ponto das vias urinárias, incluindo uretra, ureter e/ou ruim.
- Como recurso para transpassar áreas de estenoses difíceis, permitindo a passagem de cateter adequado à região.
- Como recurso auxiliar na passagem do uretrótomo, ureteroscópio, cistoscópio ou do nefroscópio.

MODO DE USO:


- Remova o Fio Guia e o suporte juntos da embalagem. Encha o suporte com solução salina fisiológica ou heparina zed através do centro do suporte utilizando uma seringa;
- Remova o Fio Guia do suporte e o inspecione antes do uso para verificar sua lubrificação. Se o Fio Guia não puder ser facilmente removido do suporte, injete mais solução salina fisiológica ou heparina zed no suporte e tente novamente;
- O Fio Guia escorregará totalmente para dentro do cateter ou para fora dele devido a sua baixa fricção ao contato;

NOTA: Mantenha pelo menos 5 cm do fio estendido para fora do centro do cateter durante a introdução e inicie o procedimento com os demais materiais.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada;
- Produto para uso único;
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem;
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica;

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

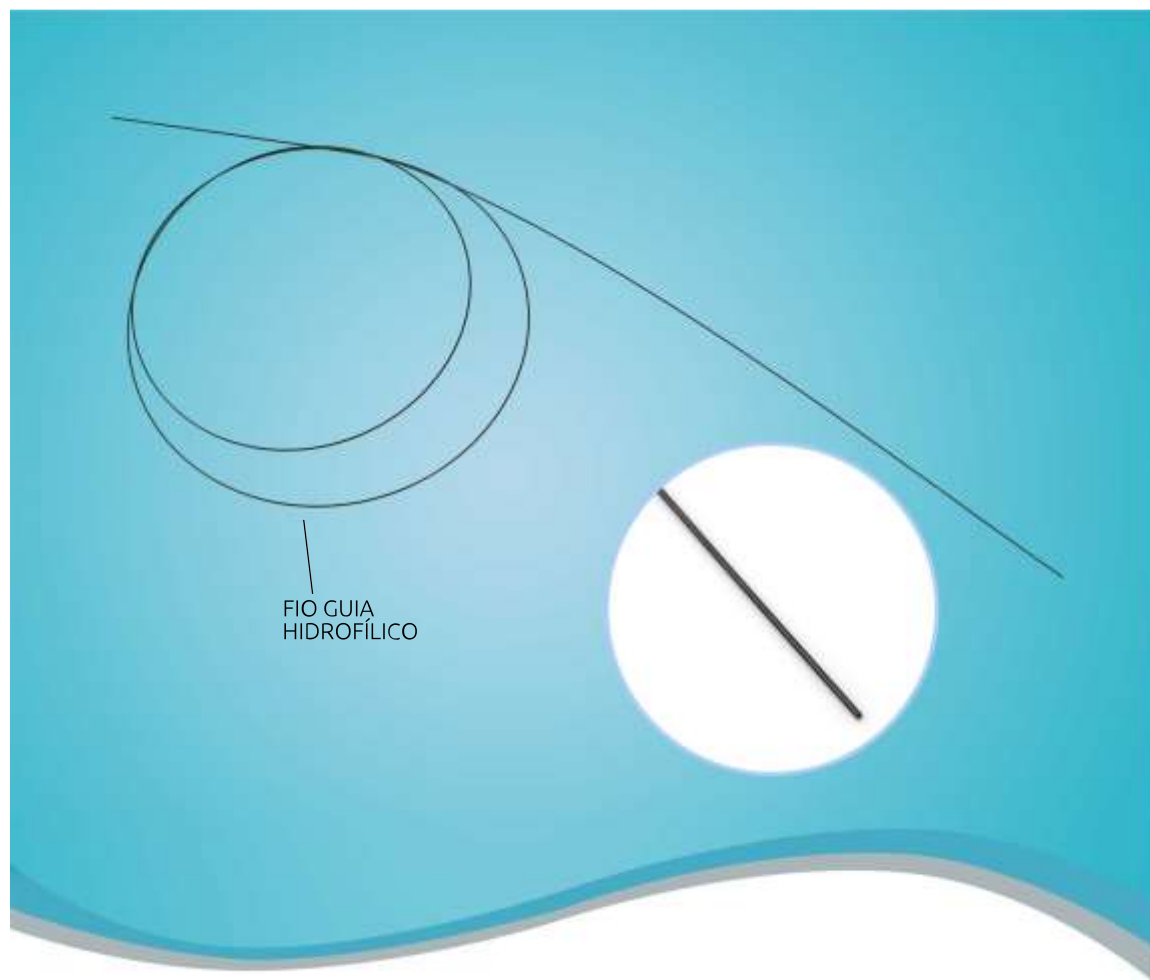

FIO GUIA HIDROFÍLICO UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

FIO GUIA HIDROFÍLICO	Aço Inoxidável 304 - Revestido de Níquel
----------------------	---

MODELOS E DIMENSÕES:

MODELOS	DIÂMETRO	COMPRIMENTO DO FIO	TIPO DE PONTA
FC028150	0,028 pol	150 cm	Curva
FS028150	0,028 pol	150 cm	Reta
FC032150	0,032 pol	150 cm	Curva
FS032150	0,032 pol	150 cm	Reta
FC035150	0,035 pol	150 cm	Curva
FS035150	0,035 pol	150 cm	Reta

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166