

## INDICAÇÃO DE USO:

Cateter DJ com Fio Guia Hidrofílico é usado para a drenagem interna temporária da junção ureteropélvica até a bexiga. São indicados para todos os pacientes com deficiência ou doenças renais temporárias ou permanentes. O Cateter Duplo J é um tubo flexível que é colocado durante a cirurgia. Este tubo tem uma curva de 360º em ambas as extremidades destinadas a evitar que o cateter se mova para dentro da bexiga ou até o rim. O cateter tem um fio amarrado a uma das extremidades que vai da bexiga até a uretra, exteriorizando-se. O cateter é colocado para prevenir ou aliviar um bloqueio no ureter, permitindo que o ureter se dilate, o que facilita para pedras ou fragmentos de pedra serem expelidos.

NOTA: Manter o cateter até no máximo 30 dias.


## MODO DE USO:

- Toda a operação deve ser realizada de forma asséptica;
- Passe o fio-guia Hidrofílico além da obstrução ureteral até a pelve renal;
- Passe o cateter sobre o fio-guia através do endoscópio. Sob visão direta, avance o cateter no ureter com o posicionador. Deve-se ter cuidado para não permitir que o fio guia avance para dentro do parênquima renal, enquanto estabilizasse o cateter com o posicionador, remova o fio-guia;
- O pigtail do cateter se formará espontaneamente. Remova o posicionador do endoscópio (citoscópio) cuidadosamente;
- Se necessário, o ajuste final pode ser realizado com uma pinça endoscópica. O cateter pode ser facilmente removido por meio de tração leve poderá utilizar a pinça endoscópica.
- Realizar procedimento sob fluoroscopia ou radiografia para facilitar a colocação do cateter.

## PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

## COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

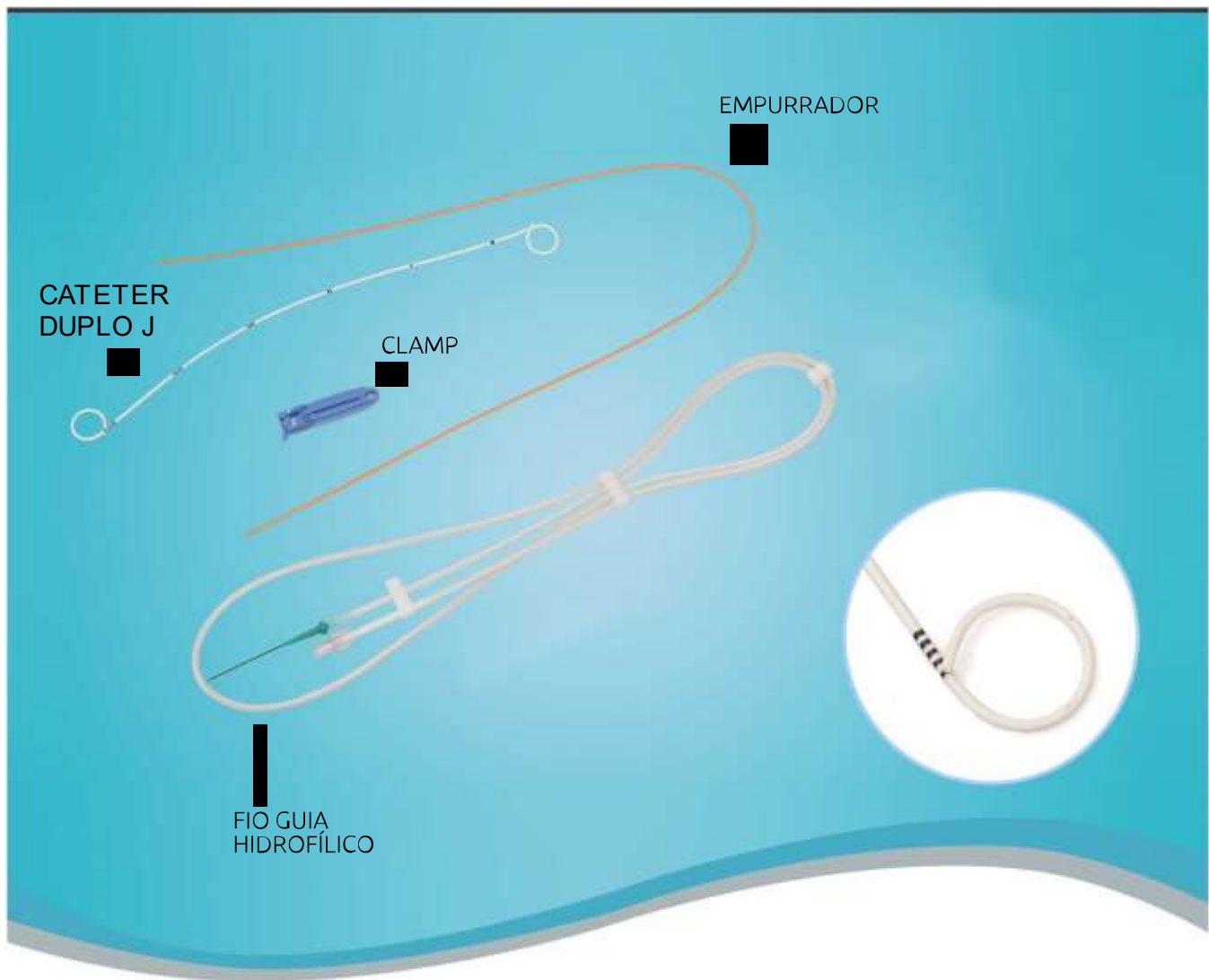

## KIT CATETER DUPLO J COM FIO GUIA HIDROFÍLICO

UROLLINE

### COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

CATETER DUPLO J	Poliuretano
EMPURRADOR	Polietileno (PEAD)
CLAMP	ABS
FIO GUIA	Aço Inoxidável 304 - Núcleo em Nitinol e cobertura hidrofílica

UROLLINE

Responsável Técnica:  
Arani F. da Costa

Coren SC 62468

**MODELOS E DIMENSÕES:**

MODELOS	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	FIO GUIA
URO 415	4 FR	15 cm	150 cm
URO 416	4 FR	16 cm	150 cm
URO 418	4 FR	18 cm	150 cm
URO 420	4 FR	20 cm	150 cm
URO 422	4 FR	22 cm	150 cm
URO 424	4 FR	24 cm	150 cm
URO 426	4 FR	26 cm	150 cm
URO428	4 FR	28 cm	150 cm
URO 4715	4.7 FR	15 cm	150 cm
URO 4716	4.7 FR	16 cm	150 cm
URO 4718	4.7 FR	18 cm	150 cm
URO 4720	4.7 FR	20 cm	150 cm
URO 4722	4.7 FR	22 cm	150 cm
URO 4724	4.7 FR	24 cm	150 cm
URO 4726	4.7 FR	26 cm	150 cm
URO 4728	4.7 FR	28 cm	150 cm
URO 4815	4.8 FR	15 cm	150 cm
URO 4816	4.8 FR	16 cm	150 cm
URO 4818	4.8 FR	18 cm	150 cm
URO 4820	4.8 FR	20 cm	150 cm
URO 4822	4.8 FR	22 cm	150 cm
URO 4824	4.8 FR	24 cm	150 cm
URO 4826	4.8 FR	26 cm	150 cm
URO 4828	4.8 FR	28 cm	150 cm
URO 515	5.0 FR	15 cm	150 cm
URO 516	5.0 FR	16 cm	150 cm
URO 518	5.0 FR	18 cm	150 cm

MODELOS	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	FIO GUIA
URO 520	5 FR	20 cm	150 cm
URO 522	5 FR	22 cm	150 cm
URO 524	5 FR	24 cm	150 cm
URO 526	5 FR	26 cm	150 cm
URO 528	5 FR	28 cm	150 cm
URO 615	6 FR	15 cm	150 cm
URO 616	6 FR	16 cm	150 cm
URO 618	6 FR	18 cm	150 cm
URO 620	6 FR	20 cm	150 cm
URO 622	6 FR	22 cm	150 cm
URO 624	6 FR	24 cm	150 cm
URO 626	6 FR	26 cm	150 cm
URO 628	6 FR	28 cm	150 cm
URO 715	7 FR	15 cm	150 cm
URO 716	7 FR	16 cm	150 cm
URO 718	7 FR	18 cm	150 cm
URO 720	7 FR	20 cm	150 cm
URO 722	7 FR	22 cm	150 cm
URO 724	7 FR	24 cm	150 cm
URO 726	7 FR	26 cm	150 cm
URO 728	7 FR	28 cm	150 cm
URO 815	8 FR	15 cm	150 cm
URO 816	8 FR	16 cm	150 cm
URO 818	8 FR	18 cm	150 cm
URO 820	8 FR	20 cm	150 cm
URO 822	8 FR	22 cm	150 cm
URO 824	8 FR	24 cm	150 cm
URO 826	8 FR	26 cm	150 cm
URO 828	8 FR	28 cm	150 cm

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

**SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:**

[sac@medhcir.com.br](mailto:sac@medhcir.com.br)

**(48) 3380-9166**