

INDICAÇÃO DE USO:

Usado para a drenagem interna temporária da junção ureteropélvica até a bexiga, com acessórios para a desobstrução da uretra e ureter. São indicados para todos os pacientes com deficiência ou doenças renais temporárias ou permanentes.

NOTA: Manter o cateter até no máximo 30 dias.


MODO DE USO:

- Passe o fio-guia além da obstrução ureteral até a pelve renal;
- Introduzido sob o canal de trabalho criado por um fio guia, o procedimento deve ser realizado sob ureteroscopia, ou fluoroscopia, através da uretra, até a altura desejada no parênquima renal;
- Realizado com o auxílio do cateter posicionador, de modo a empurrar o duplo J sobre o fio-guia, desse modo, a sonda é introduzida com as pontas retas;
- Quando o Cateter de drenagem atingiu os rins, o fio-guia é retirado lentamente, ancorando, dessa forma, primeiro a ponta superior da sonda nos rins, depois a ponta inferior na bexiga, mantendo assim, um fluxo constante entre os rins e a bexiga;
- O pigtail do cateter se formará espontaneamente. Remova o posicionador do citoscópio cuidadosamente;
- Se necessário, o ajuste final pode ser realizado com uma pinça endoscópica. O cateter pode ser facilmente removido por meio de tração de retirada leve, utilizando a pinça endoscópica.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

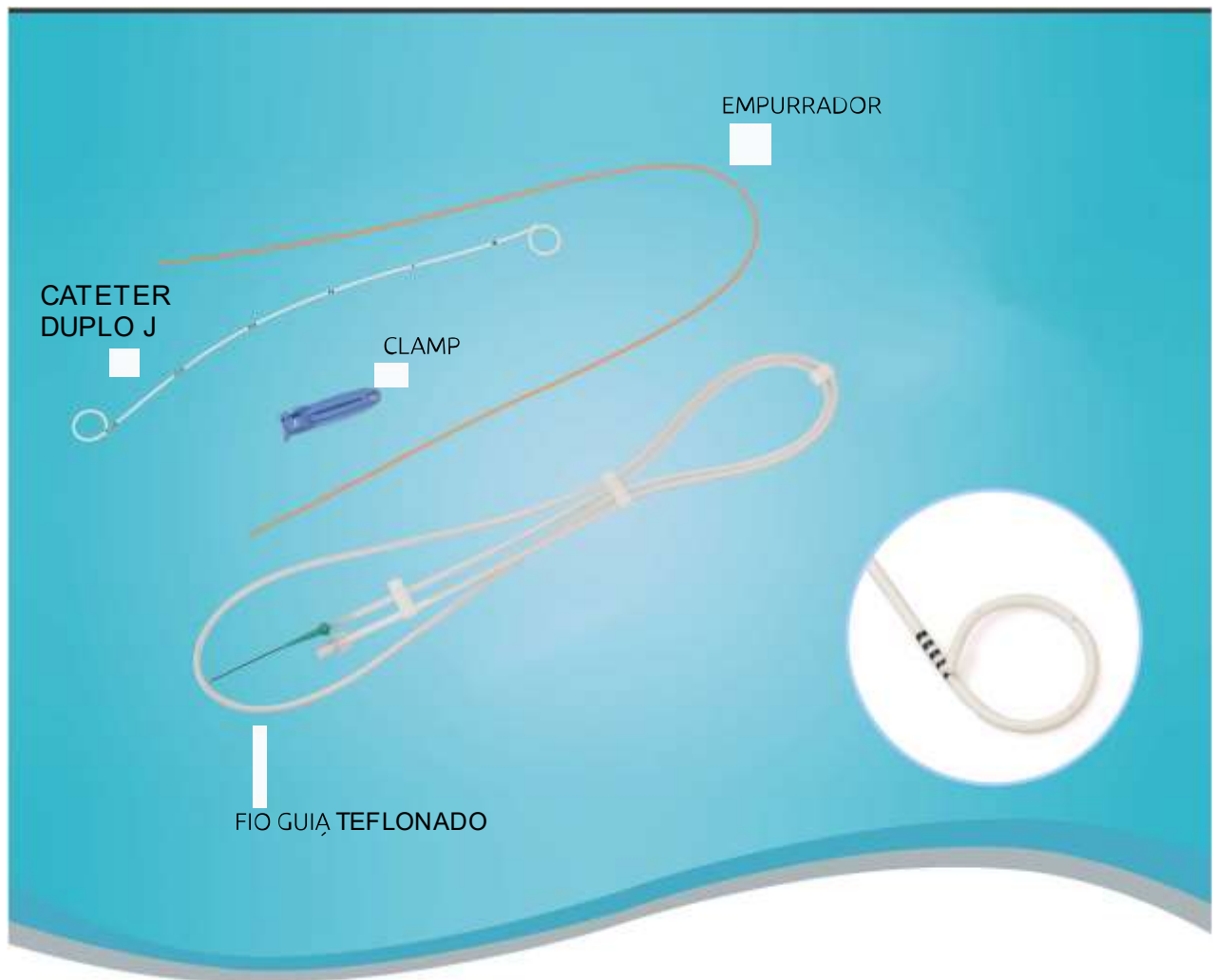

KIT CATETER DUPLO J COM FIO GUIA TEFLONADO

UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

CATETER DUPLO J	Poliuretano
EMPURRADOR	Polietileno (PEAD)
CLAMP	ABS
FIO GUIA TEFLONADO	Aço Inoxidável 304 - Núcleo em Nitinol e cobertura PTFE

UROLLINE

Responsável Técnica:
Arani F. da Costa

Coren SC 62468

MODELOS E DIMENSÕES:

MODELOS	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	FIO GUIA
F4.7 15-T	4.7 FR	15 cm	150 cm
F4.7 16-T	4.7 FR	16 cm	150 cm
F4.7 18-T	4.7 FR	18 cm	150 cm
F4.7 20-T	4.7 FR	20 cm	150 cm
F4.7 22-T	4.7 FR	22 cm	150 cm
F4.7 24-T	4.7 FR	24 cm	150 cm
F4.7 26-T	4.7 FR	26 cm	150 cm
F4.7 28-T	4.7 FR	28 cm	150 cm
F4.8 15-T	4.8 FR	15 cm	150 cm
F4.8 16-T	4.8 FR	16 cm	150 cm
F4.8 18-T	4.8 FR	18 cm	150 cm
F4.8 20-T	4.8 FR	20 cm	150 cm
F4.8 22-T	4.8 FR	22 cm	150 cm
F4.8 24-T	4.8 FR	24 cm	150 cm
F4.8 26-T	4.8 FR	26 cm	150 cm
F4.8 28-T	4.8 FR	28 cm	150 cm
F5 15-T	5 FR	15 cm	150 cm
F5 16-T	5 FR	16 cm	150 cm
F5 18-T	5 FR	18 cm	150 cm
F5 20-T	5 FR	20 cm	150 cm
F5 22-T	5 FR	22 cm	150 cm
F5 24-T	5 FR	24 cm	150 cm
F5 26-T	5 FR	26 cm	150 cm
F5 28-T	5 FR	28 cm	150 cm
F6 15-T	6 FR	15 cm	150 cm
F6 16-T	6 FR	16 cm	150 cm
F6 18-T	6 FR	18 cm	150 cm

MODELOS	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	FIO GUIA
F5 20-T	5 FR	20 cm	150 cm
F5 22-T	5 FR	22 cm	150 cm
F5 24-T	5 FR	24 cm	150 cm
F5 26-T	5 FR	26 cm	150 cm
F5 28-T	5 FR	28 cm	150 cm
F6 15-T	6 FR	15 cm	150 cm
F6 16-T	6 FR	16 cm	150 cm
F6 18-T	6 FR	18 cm	150 cm
F6 20-T	6 FR	20 cm	150 cm
F6 22-T	6 FR	22 cm	150 cm
F6 24-T	6 FR	24 cm	150 cm
F6 26-T	6 FR	26 cm	150 cm
F6 28-T	6 FR	28 cm	150 cm
F7 15-T	7 FR	15 cm	150 cm
F7 16-T	7 FR	16 cm	150 cm
F7 18-T	7 FR	18 cm	150 cm
F7 20-T	7 FR	20 cm	150 cm
F7 22-T	7 FR	22 cm	150 cm
F7 24-T	7 FR	24 cm	150 cm
F7 26-T	7 FR	26 cm	150 cm
F7 28-T	7 FR	28 cm	150 cm
F8 15-T	8 FR	15 cm	150 cm
F8 16-T	8 FR	16 cm	150 cm
F8 18-T	8 FR	18 cm	150 cm
F8 20-T	8 FR	20 cm	150 cm
F8 22-T	8 FR	22 cm	150 cm
F8 24-T	8 FR	24 cm	150 cm
F8 26-T	8 FR	26 cm	150 cm
F8 28-T	8 FR	28 cm	150 cm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166