

INDICAÇÃO DE USO:

É indicado para a manipulação e extração de cálculos urinários da bexiga, pélvis renal e ureter. Tem a principal função a retirada de cálculos renais e ureterais ou de corpo estranho nas vias urinárias. O produto deve ser inserido por meio de um ureteroscópio, cistoscópio ou outro dispositivo apropriado.


MODO DE USO:

- Verifique se o extrator de cálculos funciona bem antes da intervenção, abrindo e fechando repetidamente o cesto;
- Retire o Extrator de Cálculos da embalagem externa e ajuste a manopla para posição, deixar a cesta retraída;
- Coloque o extrator com segurança no endoscópio;
- Insira cuidadosamente o Extrator no endoscópio;
- Através de visualização direta, localize o cálculo e avance o extrator próximo ao cálculo;
- Deslize a alavanca do polegar no punho para a posição para abrir de modo a expandir a cesta junto ao cálculo e manobre o Extrator até que o cálculo esteja dentro da cesta.
- Feche um pouco o cesto para apreender o cálculo (frouxo, sem apertar);
- Desloque o extrator de cálculos no sentido proximal até o cesto ficar na ponta distal da bainha de operação ou ureteroscópico;
- Retire a bainha de operação juntamente com o extrator de cálculos;
- Finalizando assim, a retirada do cálculo;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

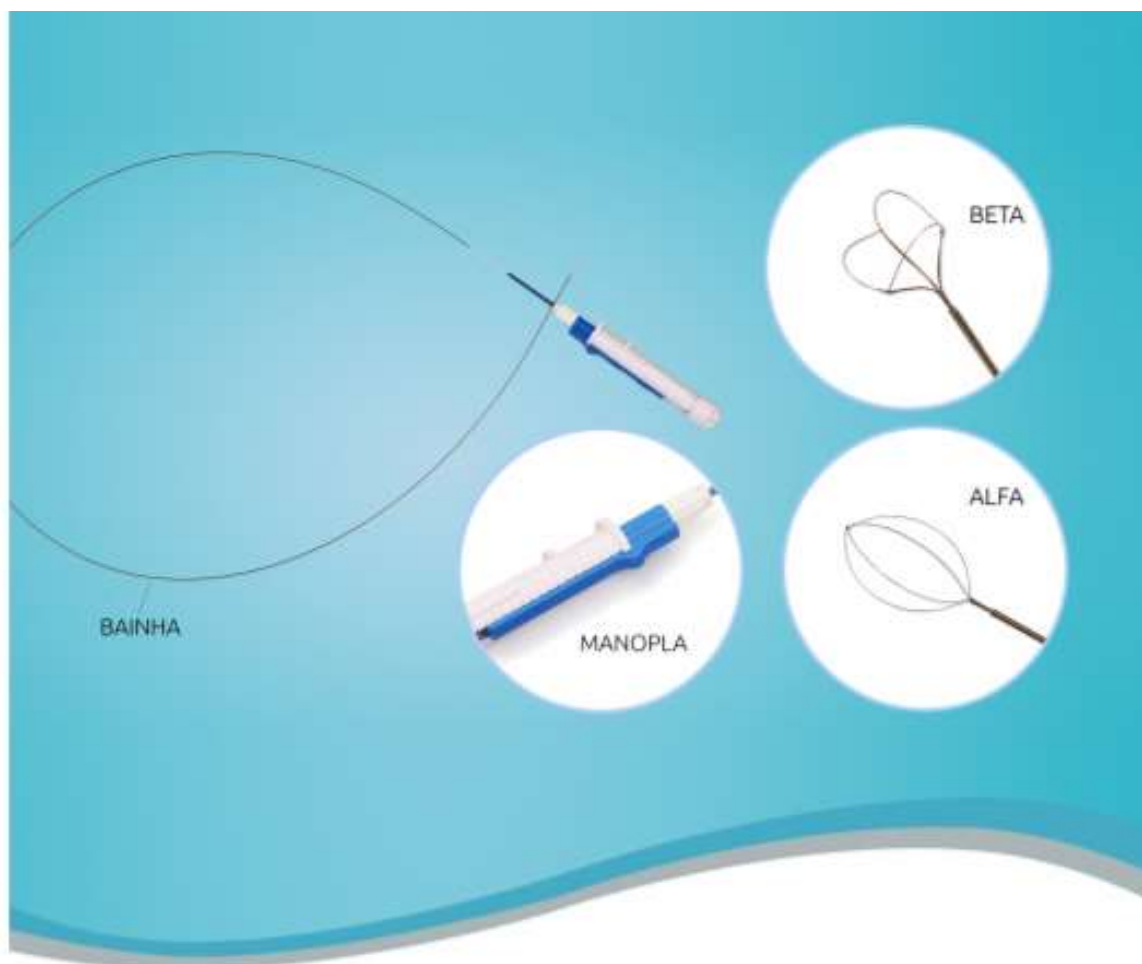

EXTRATOR DE CÁLCULO UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

CESTA	Nitíniol
BAINHA	Politetrafluoretileno (PTFE)
MANOPLA	Poliámiida (PA)

MODELOS E DIMENSÕES:

EXTRATOR BETA

MODELO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	TIPO
UROB317	1.7 fr	120 cm	3 fios
UROB318	1.8 fr	120 cm	3 fios
UROB322	2.2 fr	120 cm	3 fios
UROB324	2.4 fr	120 cm	3 fios
UROB328	2.8 fr	120 cm	3 fios
UROB330	3.0 fr	120 cm	3 fios
UROB332	3.2 fr	120 cm	3 fios
UROB340	4.0 fr	120 cm	3 fios
UROB345	4.5 fr	120 cm	3 fios

EXTRATOR ALFA

MODELO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	TIPO
URO417	1.7 fr	120 cm	4 fios
URO418	1.8 fr	120 cm	4 fios
URO422	2.2 fr	120 cm	4 fios
URO424	2.4 fr	120 cm	4 fios
URO428	2.8 fr	120 cm	4 fios
URO430	3.0 fr	120 cm	4 fios
URO432	3.2 fr	120 cm	4 fios
URO440	4.0 fr	120 cm	4 fios
URO445	4.5 fr	120 cm	4 fios

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166