

INDICAÇÃO DE USO:

- Para o posicionamento de cateteres e dilatadores, na canulação de qualquer ponto das vias urinárias, incluindo uretra, ureter e/ou rim;
- Como recurso para transpassar áreas estenóticas difíceis, permitindo a passagem de cateter adequado à região e como recurso auxiliar na passagem do uretrótomo, do ureteroscópio, do cistoscópio ou do nefroscópio;
- A cor alternativa (azul e branco) do fio de guia fornece alta visualização sob raios x e endoscopia.
- Os Fios Guia são desenhados para direcionar um cateter a localização anatômica desejada durante procedimentos de diagnóstico ou intervenção, facilitando a colocação do instrumento

MODO DE USO:

Remova o Fio Guia e o suporte juntos da embalagem;

- Antes do uso, inspecione o fio guia a fim de detectar eventuais pregas, dobras, curvas ou rachaduras;
- Irrigue o fio guia com uma solução salina esterilizada ou com uma solução isotônica semelhante, conectando uma seringa ao conector Luer do dispensador do fio guia;
- O fio-guia pode ser introduzido no paciente de uma das seguintes formas:
 - Introduza o fio-guia através de um endoscópio primeiro no ureter para obter o acesso inicial antes de colocar um cateter sobre o fio.

OU


- Carregue previamente um cateter sobre o fio-guia. Posicione o fio guia e mantenha-o na posição desejada. Deixe exposto um comprimento adequado do fio Guia, o segmento exposto do fio guia deve ser mais longo do que o comprimento do dispositivo médico a ser introduzido no paciente ou da estrutura na qual está sendo utilizado. Avance o cateter sobre o fio guia, que servirá para direcionar o endoscópio, cateter.

- NOTA: Mantenha pelo menos 5 cm do fio estendido para fora do centro do cateter durante a introdução e inicie o procedimento com os demais materiais.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

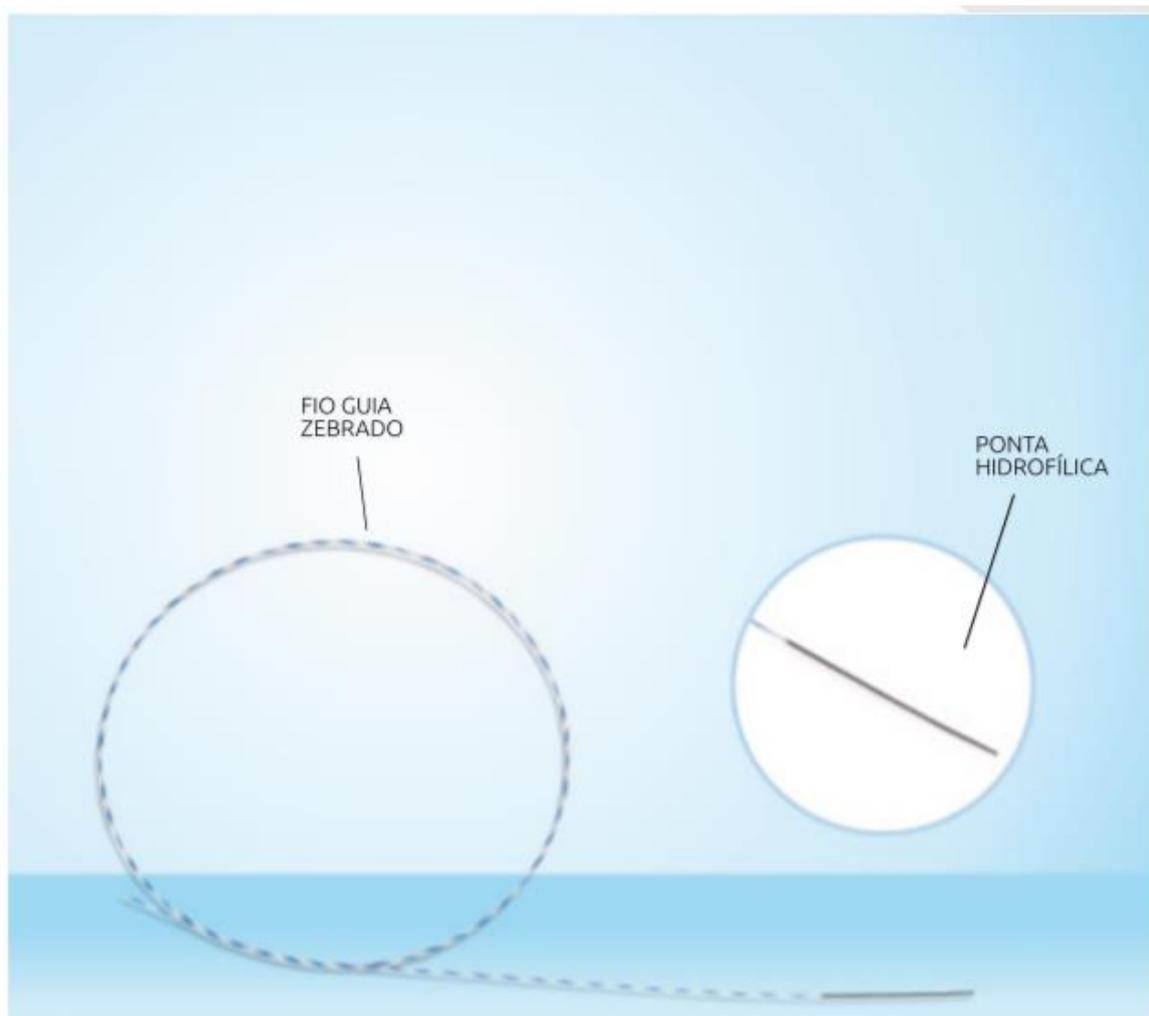

FIO GUIA ZEBRA M **UROLLINE**

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

FIO GUIA ZEBRA	Nitinol Revestido de PTFE
PONTA HIDROFÍLICA	Revestido por Nitinol Com banho hidrofílico HydroMed

MODELOS E DIMENSÕES:

MODELOS	DIÂMETRO	COMPRIMENTO DO FIO	TIPO DE PONTA
FZMC028150	0,028 pol	150 cm	Curva
FZMS028150	0,028 pol	150 cm	Reta
FZMC032150	0,032 pol	150 cm	Curva
FZMS032150	0,032 pol	150 cm	Reta
FZMC035150	0,035 pol	150 cm	Curva
FZMS035150	0,035 pol	150 cm	Reta

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166