

INDICAÇÃO DE USO:

O Dilatador Uretral Urolline é utilizado para dilatação das estruturas uretrais masculinas e contraturas vesicais. O design curvo facilita a colocação, reduzindo o trauma. O produto suporta a curvatura natural da uretra masculina. O dilatador possui uma camada de revestimento de polímero hidrofílico que atrai e segura os líquidos no dilatador, criando uma superfície lisa e de baixa fricção.

MODO DE USO:

- Usar técnica asséptica;
- Sob visão direta ou com controle fluoroscópico, posicionar um fio-guia através da uretra e inseri-lo em direção à bexiga. Em caso de anatomia difícil ou limitada, deve-se considerar o uso de um fio de nitinol hidrofílico (que não está no cadastro) ao invés de um fio de corpo rígido;
- Com o pênis suspenso, o dilatador é introduzido passando por cima do fio-guia anteriormente colocado.
- O posicionamento dentro da bexiga é confirmado pelo escoamento da urina.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:



DILATADOR URETRAL UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

DILATADOR	Polietileno com revestimento hidrofílico
-----------	---

MODELOS E DIMENSÕES:

UD-F8-F18 (8FR - 18FR x 37cm)

UD-F8-F20 (8FR - 20FR x 37cm)

UD-F8-F22 (8FR - 22FR x 37cm)

UD-F8-F24 (8FR - 24FR x 37cm)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166