

INDICAÇÃO DE USO:

Este dispositivo é usado para a drenagem percutânea temporária, realizada por punção direta na presença de obstrução renal.

NOTA: O cateter deve ser utilizado apenas de 2 a 5 dias a permanência no paciente.

MODO DE USO:

- Prepare o local de acesso, cobrir com os campos estéreis apropriados para o procedimento;
- Sua introdução deverá ser feita por material endoscópio para melhor visualização do campo interno, será usado a bacia para entrada do endoscópio após incisão;
- Faça uma pequena incisão do lado que for puncionado com agulha de duas partes;
- Puncione o sistema coletor (sistema urinário) com a agulha sob controle fluoroscópico;
- Certifique-se que o sistema coletor foi puncionado visualizando a saída de líquido (urina, pus, sangue) pela outra extremidade da agulha;
- Injete contraste iodado pela agulha para contrastar todo o sistema coletor e certificar o correto posicionamento da agulha;
- Fixe o Cateter na pele com um fio;
- Conecte o tubo de drenagem ao conjunto;
- Se desejar, utilize os clamps para prender o tubo à pele no local da punção;
- Pode-se também, acoplar uma bolsa coletora de urina (Sistema Fechado, não fornecido) no conector luer do tubo de drenagem;
- Faça um curativo seguro de maneira que evite a tração e a dobra do Cateter;

REMOÇÃO DO CATETER DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA:


- Desconecte o tubo de drenagem e retire o cateter delicadamente

NOTA: Se o acesso ao rim tiver que ser mantido, um fio-guia de 0,035" passado através do cateter pode facilitar a remoção do cateter, ainda mantendo o acesso e facilitando assim a colocação de outro cateter, se necessário.

RECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

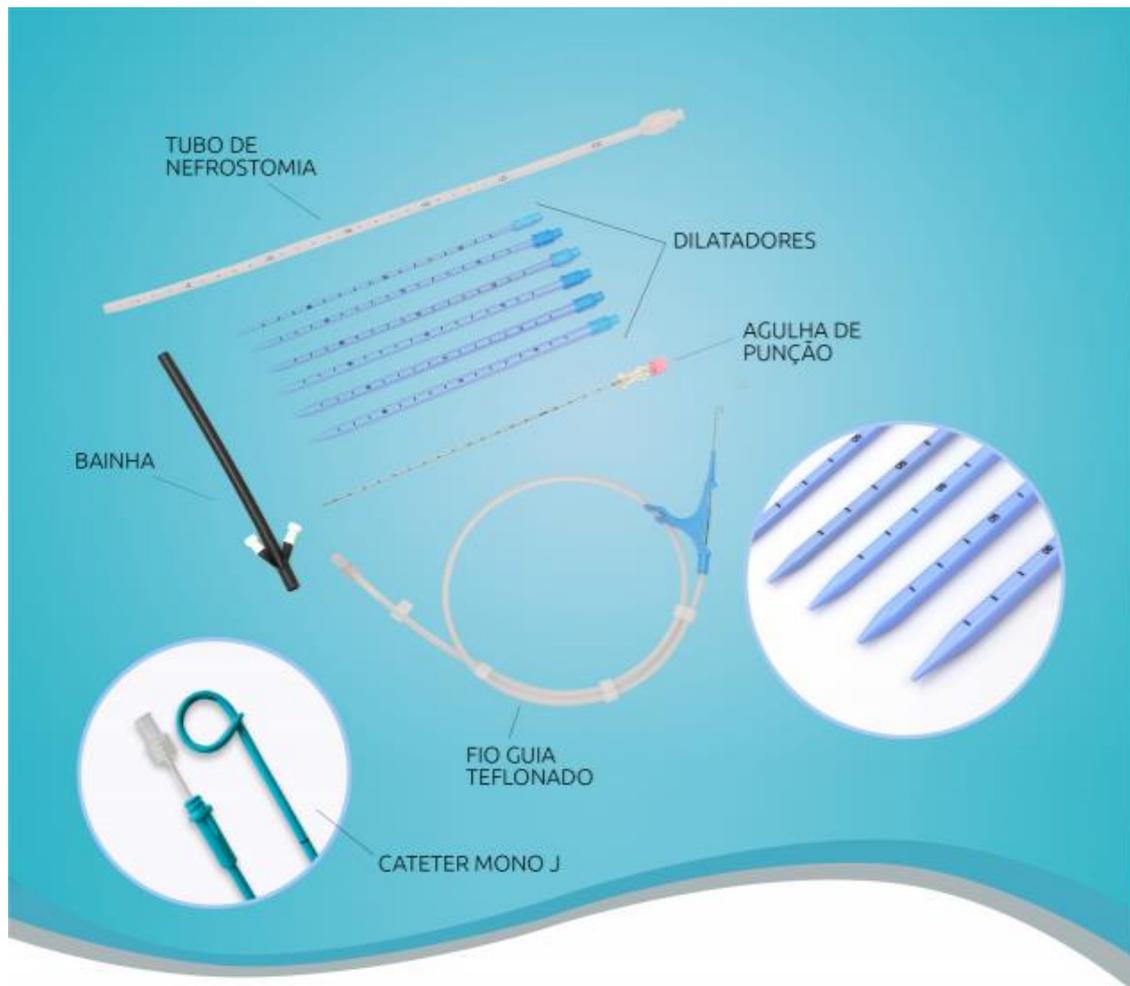

KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA C/ MONO J **UROLLINE**

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

TUBO DE NEFROSTOMIA	Silicone
AGULHA DE PUNÇÃO	Aço Inoxidável Médico - 304
DILATADORES	Poliuretano
FIO GUIA TEFLONADO	Aço Inoxidável 304 - Revestido com Teflon
BAINHA	Polietileno
CATETER MONO J	Poliuretano

MODELOS E DIMENSÕES:

MODELOS	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	TIPO
F8-F10-J	10FR	30 cm	PigTail
F8-F12-J	12FR	30 cm	PigTail
F8-F14-J	14FR	30 cm	PigTail

ALÉM DO CATETER, CADA KIT CONTÉM:

- 6 Dilatadores 8FR-18-FR;
- 1 Agulha de Punção de 18G e 20cm;
- 1 Fio Guia PTFE de 0,035cmX150cm;
- 1 Tubo de Drenagem de 15cm;
- 1 Bainha 18FR e 20cm;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166