

INDICAÇÃO DE USO:

Destinado para a dilatação progressiva dos ureteres. Os dilatadores são utilizados durante os procedimentos médicos cirúrgicos ou ambulatoriais. São destinados para a dilatação progressiva do ureter antes da remoção de cálculos, entre outros procedimentos no trato urinário. Permite a dilatação etapa por etapa do túnel intramural e ureter sequencialmente, de forma a se obter um percurso de calibre suficiente para drenagem de urina ou para instrumentação posterior do ureter. De formato retilíneo, dilata o ureter pela introdução de dilatadores de calibre apresentados de 6FR a 16FR.


MODO DE USO:

- Através do controle radiográfico ou fluoroscópico, avançar o fio guia por cistoscopia até a posição pretendida no interior do ureter;
- Posicionado o fio guia, passe o dilatador ureteral de menor calibre sobre o mesmo;
- Retire o dilatador ureteral com cuidado para que o fio guia não seja retirado da posição;
- Em seguida, passe os demais dilatadores sempre obedecendo a introdução do menor para o maior calibre;
- Repetir o procedimento até o último dilatador de interesse;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

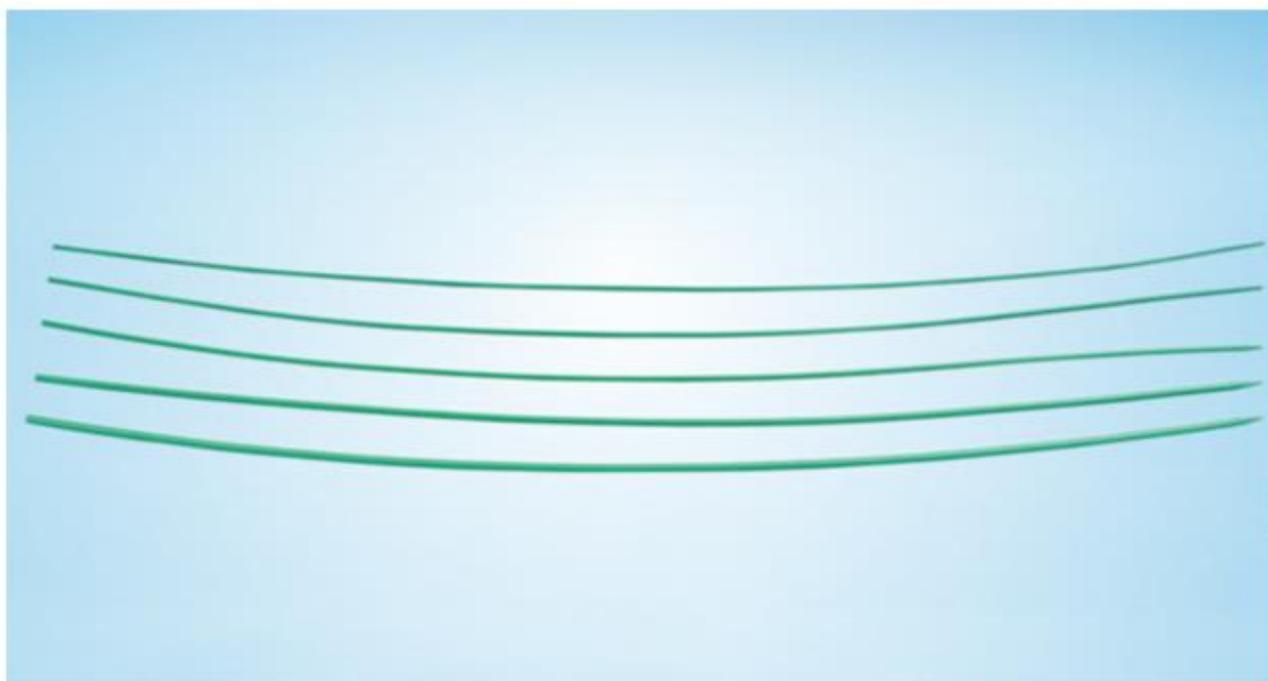

DILATADOR URETERAL UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

DILATADOR	Polietileno com revestimento hidrofílico
-----------	---

MODELOS E DIMENSÕES:

UTD-F6-F16

6FR; 8FR; 10FR; 12FR; 14FR; 16FR x 60cm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166