

INDICAÇÃO DE USO:

O Cateter Balão de Dilatação Ureteral é utilizado para dilatação ureteral antes da manipulação de cálculos ureterais ou ureteroscopia e dilatação do ureter intramural. É um cateter coaxial utilizado para exercer uma força radial a fim de dilatar segmentos ureterais estreitos, de forma a se obter um calibre suficiente para drenagem da urina ou para procedimento urológico. É designado para fornecer um segmento dilatável, que infla a um diâmetro e comprimento determinados a uma pressão específica destinada à dilatação do ureter.

MODO DE USO:

- Verifique se a embalagem está íntegra. Não utilize se a embalagem estiver violada;
- Toda a operação deve ser realizada de forma asséptica; **ATENÇÃO:** Após retirar da embalagem - Não insufla previamente o balão.
- Conecte a seringa (produto que não está no cadastro) à torneira de passagem na lateral do cateter de balão e aspire até a eliminação de todo o ar. Feche a torneira de passagem.
- Coloque a tampa endoscópica no canal acessório do cistoscópio.
- Sob radiografia e fluoroscopia, avance o fio guia pelo cistoscópio até a posição pretendida no interior do ureter;
- O pigtail do cateter se formará espontaneamente. Remova o posicionador do cistoscópio cuidadosamente. Se necessário, o ajuste final pode ser realizado com uma pinça endoscópica. O cateter pode ser facilmente removido por meio de tração de retirada leve, utilizando a pinça endoscópica. A fluoroscopia facilita a colocação do cateter; entretanto, a radiografia padrão pode ser usada;
- Passe o cateter balão sobre o fio guia (que não faz parte deste cadastro). Posicione a ponta do balão dentro do ureter distal, assegurando que uma pequena parte do balão permaneça no orifício ureteral, e a outra parte dentro da bexiga.

ATENÇÃO: Encha sempre o balão com líquido estéril. Nunca encha o balão com ar, dióxido de carbono ou qualquer outro gás.

- Abra a torneira de passagem e insufla o balão;
- Caso tenha o manômetro (material fora do cadastro), veja no rótulo do produto: a pressão máxima de enchimento. Não exceda a pressão recomendada.
- Feche a torneira de passagem, durante pelo menos 30 segundos, para manter a pressão e permitir uma dilatação adequada.


NOTA: O tempo é tão importante quanto à pressão.

- Esvazie o balão através de aspiração pela seringa. Coloque novamente o balão a um nível mais elevado e repita o processo até atingir o local desejado.
- Aspire completamente o balão e em seguida retire cuidadosamente o dispositivo.

RECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

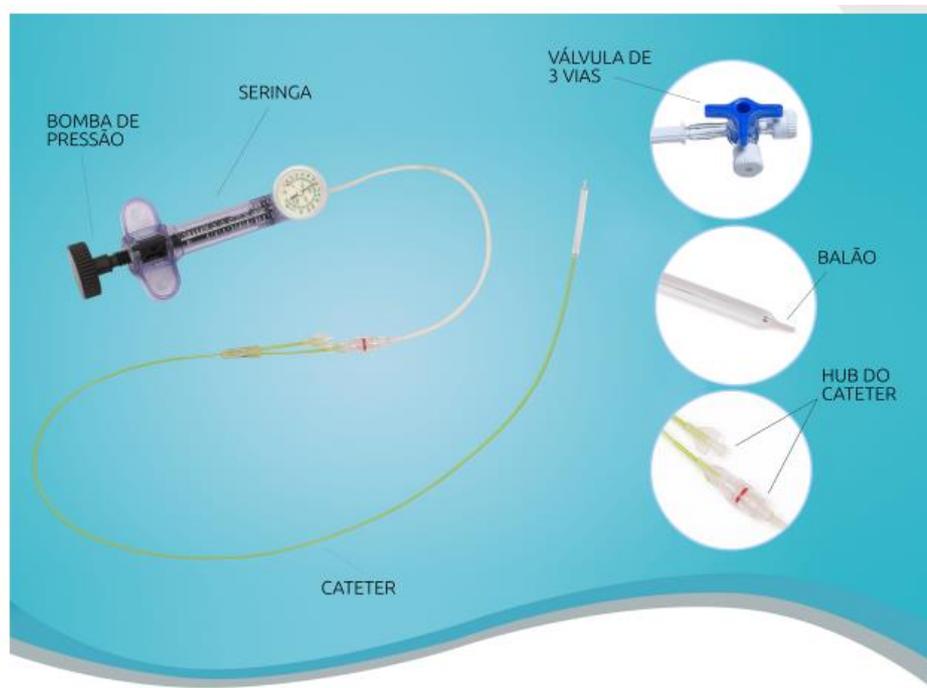

BALÃO DILATADOR URETERAL UROLLINE

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

BALÃO	PEBAX
CATETER	PEBAX
HUB DO CATETER	Polícarbonato
BOMBA DE PRESSÃO	Polietileno
SERINGA	Polipropileno
VÁLVULA DE 3 VIAS	ABS

MODELOS E DIMENSÕES:

MODELO	DIÂMETRO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	DIÂMETRO INTERNO DO BALÃO
GF3S04040	3 fr	40 cm	4 fr
GF3S04060	3 fr	60 cm	4 fr
GF3S04100	3 fr	100 cm	4 fr
GF3S05040	3 fr	40 cm	5 fr
GF3S05060	3 fr	60 cm	5 fr
GF3S05100	3 fr	100 cm	5 fr
GF3S06040	3 fr	40 cm	6 fr
GF3S06060	3 fr	60 cm	6 fr
GF3S06100	3 fr	100 cm	6 fr
GF3S07040	3 fr	40 cm	7 fr
GF3S07060	3 fr	60 cm	7 fr
GF3S07100	3 fr	100 cm	7 fr
GF3S08040	3 fr	40 cm	8 fr
GF3S08060	3 fr	60 cm	8 fr
GF3S08100	3 fr	100 cm	8 fr
GF4S04040	4 fr	40 cm	4 fr
GF4S04060	4 fr	60 cm	4 fr
GF4S04100	4 fr	100 cm	4 fr
GF4S05040	4 fr	40 cm	5 fr
GF4S05060	4 fr	60 cm	5 fr
GF4S05100	4 fr	100 cm	5 fr
GF4S06040	4 fr	40 cm	6 fr
GF4S06060	4 fr	60 cm	6 fr
GF4S06100	4 fr	100 cm	6 fr
GF4S07040	4 fr	40 cm	7 fr
GF4S07060	4 fr	60 cm	7 fr
GF4S07100	4 fr	100 cm	7 fr
GF4S08040	4 fr	40 cm	8 fr
GF4S08060	4 fr	60 cm	8 fr
GF4S08100	4 fr	100 cm	8 fr
GF5S04040	5 fr	40 cm	4 fr
GF5S04060	5 fr	60 cm	4 fr
GF5S04100	5 fr	100 cm	4 fr
GF5S05040	5 fr	40 cm	5 fr
GF5S05060	5 fr	60 cm	5 fr
GF5S05100	5 fr	100 cm	5 fr
GF5S06040	5 fr	40 cm	6 fr
GF5S06060	5 fr	60 cm	6 fr
GF5S06100	5 fr	100 cm	6 fr
GF5S07040	5 fr	40 cm	7 fr
GF5S07060	5 fr	60 cm	7 fr
GF5S07100	5 fr	100 cm	7 fr
GF5S08040	5 fr	40 cm	8 fr
GF5S08060	5 fr	60 cm	8 fr
GF5S08100	5 fr	100 cm	8 fr

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@medhcir.com.br

(48) 3380-9166