

## INDICAÇÃO DE USO:

Destinado à drenagem da urina dos rins até a bexiga, mantendo um canal constante de fluxo através de suas pontas, uma em cada extremidade da sonda, ligando desse modo os rins com a bexiga e realizando a drenagem. Este cateter é um tubo com micros orifícios com uma curva de 360º (chamado "rabo de porco") em ambas as extremidades destinadas a evitar que o cateter se mova para dentro da bexiga ou até o rim.

**NOTA: Manter o cateter até no máximo 30 dias.**


## MODO DE USO:

- Verifique se a embalagem está íntegra. Não utilize se a embalagem estiver violada;
- Toda a operação deve ser realizada de forma asséptica;
- Passe o fio-guia além da obstrução ureteral até a pelve renal;
- Passe o cateter DJ Hidrofilico (que anteriormente deixado imerso em Solução salina para ativar a hidrofília) sobre o fio-guia através do cistoscópio. Sob visão direta, avance o cateter no ureter com o posicionador. Deve-se ter cuidado para não permitir que o fio guia avance para dentro do parênquima renal;
- Quando a ponta distal do cateter for observada na junção uterovesical, interrompa o avanço do cateter. Enquanto estabiliza o cateter com o posicionador, remova o fio-guia;
- O pigtail do cateter se formará espontaneamente. Remova o posicionador do cistoscópio cuidadosamente. Se necessário, o ajuste final pode ser realizado com uma pinça endoscópica. O cateter pode ser facilmente removido por meio de tração de retirada leve, utilizando a pinça endoscópica. A fluoroscopia facilita a colocação do cateter; entretanto, a radiografia padrão pode ser usada;

## RECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Embalagem esterilizada.
- Produto para uso único.
- Não usar o produto se houver qualquer tipo de dano na embalagem.
- Os produtos são restritos para utilização por profissionais da área médica.

## COMPOSIÇÃO DO MATERIAL:

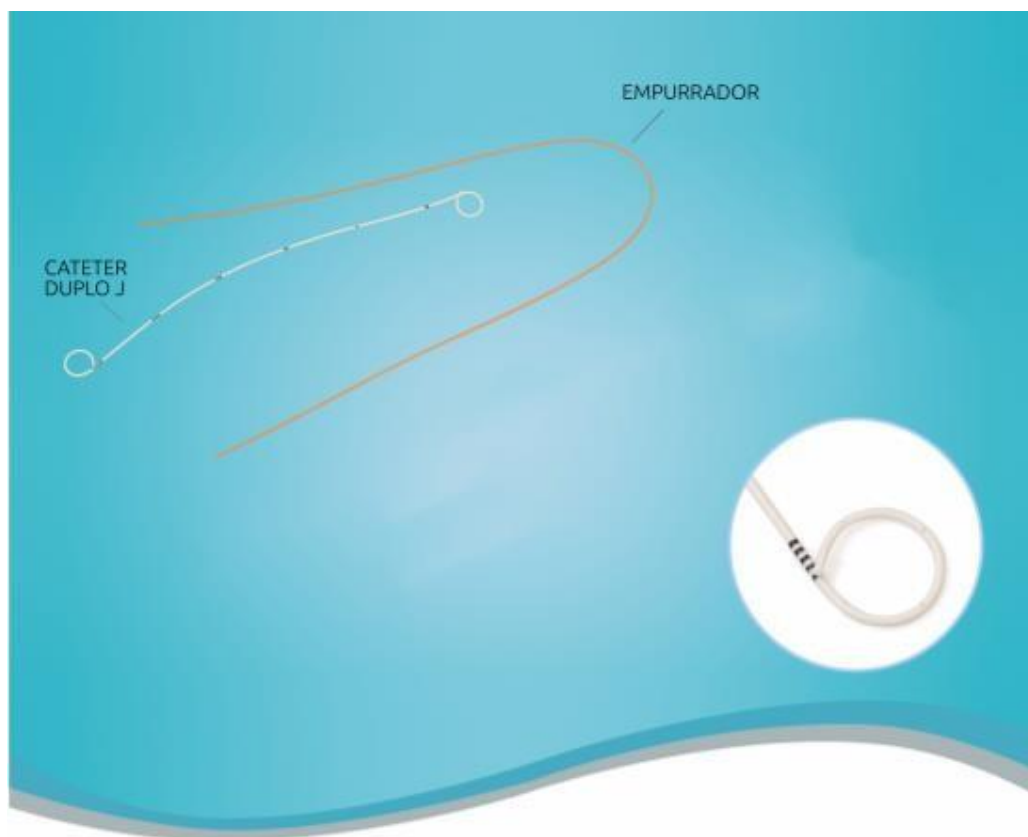

## CATETER DUPLO J HIDROFÍLICO UROLLINE

### COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

CATETER DUPLO J	Poliuretano
EMPURRADOR	Polietileno (PEAD)
REVESTIMENTO HIDRO	Polivinilpirrolidona (PVP)

## MODELOS E DIMENSÕES:

MODELOS			
F415H	F4715H	F4815H	F515H
F416H	F4716H	F4816H	F516H
F418H	F4718H	F4818H	F518H
F420H	F4720H	F4820H	F520H
F422H	F4722H	F4822H	F522H
F424H	F4724H	F4824H	F524H
F426H	F4726H	F4826H	F526H
F428H	F4728H	F4828H	F528H
F615H	F715H	F815H	
F616H	F716H	F816H	
F618H	F718H	F818H	
F620H	F720H	F820H	
F622H	F722H	F822H	
F624H	F724H	F824H	
F626H	F726H	F826H	
F628H	F728H	F828H	

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade: 3 anos

Esterilizado em Oxido de Etileno.

Fabricante: Hunan Reborn Medical Science and Technology Development Co., Ltd

Importador e Distribuidor: Medhcir Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda

Endereço: Rua Domingos André Zanini 277, sala 1211 a 1213 Bairro Campinas – São José/SC - CEP : 88117-020

### SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:

[sac@medhcir.com.br](mailto:sac@medhcir.com.br)

(48) 3380-9166